


MANUALE D'USO

Poltrone

**LADY BERGERE 2.0 - LADY WI 2.0 -
LADY UP & DOWN - LADY COMFORT
SLIM - LADY TWIST**

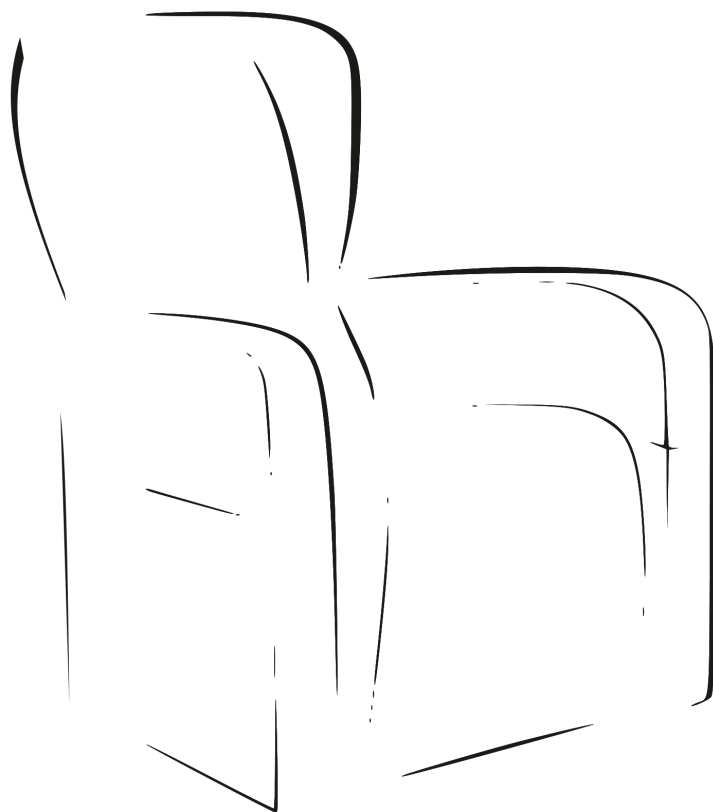


WIMED
TECNOLOGIE MEDICALI

CE

INDICE:

1. INFORMAZIONI GENERALI:	pg.3
2. AVVERTENZE SULLA SICUREZZA:	pg.4
3. DESCRIZIONE:	pg.7
4. CARATTERISTICHE TECNICHE:	pg.8
5. MONTAGGIO:	pg.10
6. CORRISPONDENZA CODICI:	pg.13
7. MANUTENZIONE:	pg.16
8. LAVAGGIO:	pg.16
9. NOTE:	pg.17
10. ETICHETTATURA:	pg.18
11. SMALTIMENTO:	pg.20
12. RECLAMI E INCIDENTI:	pg.20
13. CERTIFICATO DI GARANZIA:	pg.21

1. INFORMAZIONI GENERALI:

Gentile Cliente,
desideriamo ringraziarla per l'acquisto della poltrona Wimed, distribuita da MOVI Spa - Divisione Wimed.

La preghiamo, prima dell'utilizzo, di leggere attentamente il presente manuale di istruzioni e conservarlo con il relativo scontrino fiscale per poter usufruire della garanzia.

Il Fabbricante potrebbe avere aggiornato le informazioni contenute in questo manuale. In caso di necessità contattare il Fabbricante per ricevere l'ultima versione aggiornata.



NON UTILIZZARE IL PRODOTTO PRIMA DI AVERE LETTO IL MANUALE D'USO

Movi SpA - Divisione Wimed, persegue la politica del continuo miglioramento del proprio prodotti e si riserva il diritto di modificare le specifiche presentate in questo manuale.

2. AVVERTENZE SULLA SICUREZZA:

Spiegazione dei simboli di sicurezza utilizzati

Nel presente manuale vengono utilizzati i seguenti simboli:



Avvertenze contro danni a persone:

Questo simbolo indica la presenza di pericoli generici che possono causare pericolo di vita e per la salute.



Avvertenze contro danni a oggetti:

Questo simbolo indica la possibilità di danni a oggetti. È possibile che si verifichino danni al meccanismo e ai materiali o all'ambiente circostante.



Altre avvertenze:

Questo simbolo indica un suggerimento generico utile. Seguendo questo suggerimento, viene facilitato l'utilizzo del dispositivo e una migliore comprensione delle istruzioni.



Leggere attentamente e conservare il manuale d'uso prima di utilizzare il prodotto.




ATTENZIONE! Durante la movimentazione esiste il rischio di cesoiamento e schiacciamento!

Al fine di evitare qualsiasi rischio, è necessario non avvicinarsi durante il funzionamento. I comandi ad azione mantenuta permettono comunque di arrestare immediatamente il movimento.

- La poltrona deve essere utilizzata unicamente da persone adulte e responsabili oppure sotto la diretta supervisione di una persona con tali caratteristiche, e per l'utilizzo a cui è destinata.
- Quando si azionano i comandi occorre essere in grado di visualizzare l'area circostante per impedire che persone, animali o cose possano subire danni dalle parti in movimento.
- A bambini ed animali deve essere impedito di avvicinarsi alla poltrona.
- Azionare i comandi con una persona seduta sulla poltrona.
- L'utilizzatore deve sedersi e alzarsi unicamente quando la pediera è abbassata. Si raccomanda quindi di lasciare la poltrona in posizione "seduta".
- Il prodotto dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio. Il fabbricante non può essere considerato responsabile per danni causati da usi impropri, erronei e irragionevoli.
- Attenzione: non è ammessa alcuna modifica di questo apparecchio. Interventi, anche di lieve entità, devono essere effettuati da personale autorizzato. Ogni manomissione o modifica non preventivamente autorizzate dal fabbricante sollevano quest'ultimo dai danni derivati o riferibili agli atti suddetti. In caso di modifica devono essere effettuati esami e prove adeguate ad assicurare l'utilizzo in sicurezza.
- Per evitare il rischio di shock elettrico, questo apparecchio deve essere collegato esclusivamente a reti di alimentazione con protezione mediante messa a terra.
- Non intervenire sui cablaggi elettrici e posizionare la poltrona in modo tale che sia possibile disinserire la spina di alimentazione con facilità in caso di guasti o danneggiamenti accidentali dei collegamenti.
- Non appoggiare oggetti né camminare sul cavo di alimentazione.
- La poltrona non deve essere assolutamente utilizzata in luoghi con atmosfera esplosiva, in quanto non è stata progettata per tale uso.
- Il trasporto della poltrona deve essere effettuato nell'imballo originale da due persone adulte. Conservare l'imballo e riutilizzarlo per il trasporto della poltrona. Non lasciare le parti dell'imballo alla portata dei bambini, in quanto potenziali fonti di pericolo.
- La poltrona deve essere utilizzata su superfici piane e orizzontali. Non è in grado di superare barriere o gradini anche se bassi.
- Utilizzare solo in interni e in ambienti chiusi e riparati.
- Quando non viene utilizzato assicurarsi che l'apparecchio sia spento, con la spina staccata e il telecomando riposto nell'apposita tasca.

- In fase di installazione e di utilizzo della poltrona, verificare che l'alimentatore sia posto in una posizione facilmente accessibile, qualora, in caso di emergenza, si rendesse necessario isolare la poltrona dalla rete elettrica.

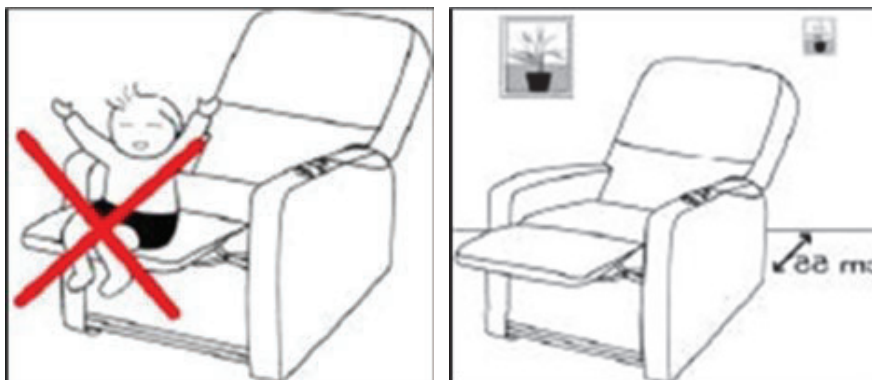

ATTENZIONE!

Non sedersi sulla pediera per non causare lo sbilanciamento in avanti della poltrona.

Non avvicinarsi alla poltrona durante il funzionamento.

Non sedersi sui braccioli.

ATTENZIONE!

Posizionare la poltrona ad almeno 60 cm dal muro per consentire allo schienale di scendere liberamente.

Verificare sempre la profondità massima della poltrona distesa, come da tabella presente nel capitolo "Caratteristiche tecniche".



Nella poltrona sono installati più cavi elettrici, che ne garantiscono il corretto funzionamento. Si raccomanda la massima attenzione, in particolare verso il cavo del telecomando che, in alcune posizioni, potrebbe comportare il rischio di strangolamento. Non lasciare i cavi pendenti o accessibili mentre il dispositivo è in uso o a riposo.

Prestare particolare attenzione alla presenza di bambini, che non devono giocare né entrare in contatto con i cavi elettrici. Allo stesso modo, i caregiver o gli assistenti devono vigilare nel caso di utenti con capacità cognitive ridotte o alterate (ad esempio persone con disabilità cognitiva, demenza, o che assumono farmaci che compromettono l'attenzione o la percezione del rischio), assicurandosi che i cavi non rappresentino un pericolo di intrappolamento o strangolamento.

3. DESCRIZIONE:

Le poltrone elevabili 1 motore e 2 motori sono realizzate con un design elegante e moderno. Grazie al meccanismo, è possibile assumere la posizione eretta, seduta o totalmente reclinata.

La poltrona deve essere utilizzata solo da persone adulte e responsabili oppure sotto la diretta supervisione di una persona con tali caratteristiche, e per l'utilizzo a cui è destinata.

MOVI Spa non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a persone e cose in caso di: uso improprio, scorretto, o comunque difforme dalle indicazioni fornite dal presente manuale che costituisce parte integrante del prodotto, o per modifiche non autorizzate al prodotto.

4. CARATTERISTICHE TECNICHE:

	LADY WI 2.0	LADY BERGERE 2.0	LADY TWIST
	2 M	2 M	2 M
Altezza totale:	112 cm	108 cm	107 cm
Larghezza totale:	80 cm	80 cm	79 cm
Profondità poltrona:	90 cm	80 cm	100 cm
Altezza schienale della seduta:	80 cm	70 cm	68 cm
Profondità seduta:	50 cm	50 cm	54 cm
Altezza seduta da terra:	50 cm	50 cm	52 cm
Larghezza seduta tra i braccioli:	50 cm	53 cm	52 cm
Profondità poggiatesta	46 cm	40 cm	40 cm
Altezza poggiatesta aperto da terra	50 cm	54 cm	43 cm
Profondità massima distesa	180 cm	174 cm	165 cm
Rotazione			180°*
Portata max:	150 kg	150 kg	150 kg

***La poltrona LADI TWIST ruota di 180° da sinistra a destra, e viceversa, quando si trova in posizione seduta o reclinata. Per motivi di sicurezza dell'utilizzatore, la funzione di rotazione è bloccata quando la poltrona è in posizione "alza in piedi".**

Poltrone LADY BERGERE 2.0 - LADY WI 2.0 - LADY UP & DOWN - LADY COMFORT SLIM - LADY TWIST


	LADY UP & DOWN	COMFORT SLIM
	1 M + 1	1 M
Altezza totale:	da 112 a 132 cm	112 cm
Larghezza totale:	75 cm	71 cm
Profondità poltrona:	96 cm	80 cm
Altezza schienale della seduta:	70 cm	70 cm
Profondità seduta:	54 cm	50 cm
Altezza seduta da terra:	da 50 a 70 cm	48 cm
Larghezza seduta tra i braccioli:	54 cm	50 cm
Profondità poggiapiedi	34 cm	35 cm
Altezza poggiapiedi aperto da terra	62 cm	48 cm
Profondità massima distesa	168 cm	156 cm
Portata max:	150 kg	130 kg

5. MONTAGGIO:

Assemblaggio schienale

Per tutti i modelli ad esclusione della Lady Twist.

Applicare lo schienale inserendo i montanti, situati ai lati, nelle due baionette posizionate sul retro della seduta, quindi spingere verso il basso fino allo scatto di fine corsa. Per estrarre lo schienale agire all'inverso. Sollevare lo schienale mentre si agisce sulla baionetta per sganciare i montanti.

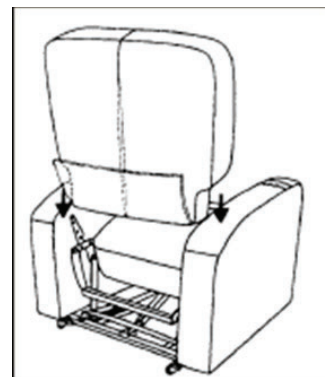


Montaggio Lady Twist

- Sollevare la poltrona con movimento alzainpiedi.
- Reclinare manualmente lo schienale all'indietro e far combaciare la forchetta presente sul telaio con il foro del braccio dell'attuatore.
- Inserire il perno di blocco e la graffetta di sicurezza.
- Riportare la poltrona in posizione 0.
- Reclinare lo schienale all'indietro.
- Applicare il cuscino con il lembo di tessuto rivolto in avanti e fissarlo alla pediera.

Posizionamento

- Posizionare la poltrona ad almeno 60 cm dal muro retrostante.
- La poltrona deve essere utilizzata sempre su superfici piane e orizzontali e gli spostamenti devono essere effettuati con la poltrona libera, senza l'occupante.
- Scollegare il cavo di alimentazione prima di effettuare qualsiasi spostamento.

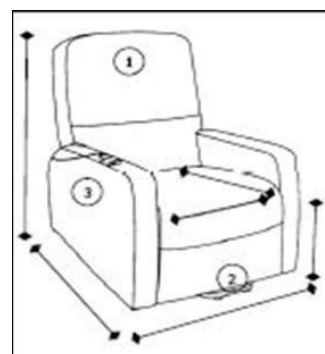

Componenti

La confezione include:

- Schienale
- Pediera o alzagambe
- Bracciolo e pulsantiera

Modello 1 motore

I comandi delle poltrone LADY sono del tipo ad azione mantenuta. Permettono comunque di arrestare il movimento immediatamente.

Tenere premuto il tasto fino al raggiungimento della posizione desiderata.

Per un aiuto concreto, consigliamo di lasciarsi innalzare fino a quando non viene raggiunta la massima elevazione.



TASTO SX		TASTO DX
Da posizione "seduta", eleva la poltrona alla posizione "alza in piedi". Da posizione "RELAX", eleva lo schienale e contemporaneamente richiude la pediera per poi proseguire fino a raggiungere la posizione "alza in piedi".		Da posizione "seduta", eleva la pediera e contemporaneamente reclina lo schienale. Abbassa la poltrona dalla posizione "alza in piedi".



Seduta



Comfort



Relax



Alza in piedi

Modello 2 motori

Grazie ai due motori è possibile scegliere, indipendentemente, la posizione della pediera da quella dello schienale.

I comandi delle poltrone LADY sono del tipo ad azione mantenuta. Permettono comunque di arrestare il movimento immediatamente. Tenere premuto il tasto fino al raggiungimento della posizione desiderata.

I tasti hanno sempre una doppia funzione. Per un aiuto concreto, consigliamo di lasciarsi innalzare fino a quando non viene raggiunta la massima elevazione.



TASTO SX Alto	TASTO CENTRALE Alto	TASTO DX Alto
Da posizione "RELAX", eleva lo schienale.	Movimento contemporaneo elevazione schienale e abbassamento gambe	Da posizione "seduta": eleva la poltrona alla posizione "alza in piedi".
TASTO SX Basso	TASTO CENTRALE Basso	TASTO Dx Basso
Da posizione "seduta", abbassa lo schienale.	Movimento contemporaneo elevazione gambe e abbassamento schienale	Da posizione "alza in piedi": abbassa la poltrona ed eleva la pediera.

6. CORRISPONDENZA CODICI:

CODICE	MODELLO	MOTORE	COLORE
57480001/L	LADY BERGERE 2.0	2 M	Verde Citric - Antimacchia
57480002/L			Marrone Chocolate - Antimacchia
57480003/L			Bordeaux Marsala - Antimacchia
57480004/L			Blu Ocean - Antimacchia
57480005/L			Beige Almond - Antimacchia
57480006/L			Grigio Light Grey - Antimacchia
57460005/L	LADYWI 2.0	2 M	Verde Citric - Antimacchia
57460006/L			Grigio Light Grey - Antimacchia
57460010/L			Marrone Chocolate - Antimacchia
57460013/L			Bordeaux Marsala - Antimacchia
57460016/L			Beige Almond - Antimacchia
57460022/L			Blu Ocean - Antimacchia
57630001/L	LADY UP&DOWN	1M+1	Bordeaux Marsala - Antimacchia
57630002/L			Blu Ocean - Antimacchia
57630003/L			Marrone Chocolate - Antimacchia
57630004/L			Beige Almond - Antimacchia
57630005/L			Verde Citric - Antimacchia
57630006/L			Grigio Light Grey - Antimacchia
57451004/L	COMFORT SLIM	1M	Grigio Light Grey - Antimacchia
57451006/L			Verde Citric - Antimacchia

**Poltrone LADY BERGERE 2.0 - LADY WI 2.0 - LADY UP & DOWN - LADY COMFORT
SLIM - LADY TWIST**

CODICE	MODELLO	MOTORE	COLORE
57451010/L			Marrone Chocolate - Antimacchia
57451013/L			Bordeaux Marsala - Antimacchia
57451016/L			Beige Almond - Antimacchia
57451023/L			Blu Ocean - Antimacchia
57650001	LADY TWIST	2 M	Tortora Taupe - Antimacchia
57650002			Grigio Scuro Dark Grey - Antimacchia
57650003			Petrolio Petrol - Antimacchia

**Poltrone LADY BERGERE 2.0 - LADY WI 2.0 - LADY UP & DOWN - LADY COMFORT
SLIM - LADY TWIST**

CODICE	FOULARD
57999901	FOULARD POLTRONA TESSUTO ANTIMACCHIA BORDEAUX/BURGUNDY
57999902	FOULARD POLTRONA TESSUTO ANTIMACCHIA BLU
57999903	FOULARD POLTRONA TESSUTO ANTIMACCHIA BEIGE
57999904	FOULARD POLTRONA TESSUTO ANTIMACCHIA GRIGIO CHIARO
57999906	FOULARD POLTRONA TESSUTO ANTIMACCHIA VERDE
57999907	FOULARD POLTRONA TESSUTO ANTIMACCHIA MARRONE

7. MANUTENZIONE:

Tutte le poltrone elevabili Wimed sono rivestite in tessuto microfibra Lisbon antimacchia in poliestere 100%, nei colori indicati all'interno del capitolo "Corrispondenza codici".

La poltrona non necessita di manutenzione eccetto per la pulizia periodica del tessuto che può essere effettuata con aspirapolvere o, in caso di sporco ostinato, lavando i tessuti.

Le poltrone non sono sfoderabili. Procedere al lavaggio agendo sempre dal bordo della macchia verso il centro per evitare che si espanda.

- In caso di utilizzo della poltrona da parte di più persone, è necessario procedere a una pulizia giornaliera del prodotto.
- Questi consigli devono essere considerati come un'assistenza al consumatore, non come una garanzia.
- Per effettuare ogni intervento di manutenzione scollegare la poltrona dalla rete di alimentazione.

Movi Spa non garantisce il funzionamento e la sicurezza della poltrona in caso di utilizzo di componenti non originali.

La durata di vita del prodotto può variare in base alla sua corretta manutenzione. La vita utile del dispositivo termina in presenza di usura o rottura di componenti del dispositivo non sostituibili.

8. LAVAGGIO:

Caffè, latte, tè: tamponare con carta assorbente ed eliminare la macchia con un panno imbevuto di acqua e sapone neutro. Se la macchia persiste strofinare con un tampone imbevuto di alcool denaturato.

Inchiostro, biro: assorbire con carta assorbente e poi trattare la macchia con un tampone imbevuto di trielina o percloroetilene.

Vini e liquori: assorbire con carta assorbente e tamponare con alcool denaturato.

Erba, marmellata: strofinare la macchia con un tampone imbevuto di acqua.

Per eliminare eventuali aloni tamponare con carta assorbente e ripetere il trattamento con un panno imbevuto di alcool denaturato.

9. NOTE:



Nota bene

Movi S.p.A. Divisione Wimed si riserva il diritto di modificare senza alcuna notifica qualsiasi caratteristica del prodotto indicata in questo manuale, che non abbia alcun impatto sulla sicurezza dello stesso.

Per informazioni sul prodotto rivolgersi a:

Movi SpA - Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano
Tel. 02 509051 Fax: 02 5061048

10. ETICHETTATURA:

A ogni prodotto viene applicata una targhetta di identificazione corredata dai dati costruttivi e dalla marcatura CE, secondo la direttiva vigente.

POLTRONA LADY BERGERE 2.0 2M LADY BERGERE 2.0 2M ARMCHAIR

Colore Beige - Colour Beige - Lisbon antistain Almond

LOT XXXXXXXX

20XX 

REF 57480005/L



MOVI S.p.A.

Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano Italy
MADE IN CHINA

Input:100-240V 50/60 Hz 150 kg 



POLTRONA LADY WI 2.0 2M LADY WI 2.0 2M ARMCHAIR

Colore Beige - Colour Beige - Lisbon Anti-Stain ALMOND

LOT XXXXXXXX

20XX 

REF 57460016/L



MOVI S.p.A.

Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano Italy
MADE IN CHINA

Input:100-240V 50/60 Hz 150 kg 



POLTRONA LADY UP&DOWN 1M+1 LIFTCHAIR LADY UP&DOWN 1M+1

Colore Beige / Colour Beige - Lisbon Anti-Stain ALMOND

LOT XXXXXXXX

20xx 

REF 57630004/L



MOVI S.p.A. - Divisione Wimed

Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano Italy
MADE IN CHINA

Input:100-240V 50/60 Hz 150 kg 



POLTRONA COMFORT SLIM 1M LIFTCHAIR COMFORT SLIM 1M

Colore Beige / Colour Beige - Lisbon Anti-Stain ALMOND

LOT XXXXXXXX

20xx 

REF 57451016/L



MOVI S.p.A. - Divisione Wimed

Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano Italy
MADE IN CHINA

Input:100-240V 50/60 Hz 130 Kg 



POLTRONA GIREVOLE LADY TWIST
REVOLVING LIFTCHAIR LADY TWIST

Colore Tortora - Colour Taupe

Tessuto Queens antimacchia / Anti-stain Queens fabric

REF **57650001**



MOVI S.p.A.

Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano Italy

MADE IN CHINA

LOT XXXXXXXX

20XX

Input:100-240V 50/60 Hz 150 kg



11. SMALTIMENTO:

Si prega di rispettare l'ambiente e di riciclare il presente prodotto conferendolo presso un centro di riciclaggio locale al termine del suo utilizzo.

Tutte le parti in legno devono essere smontate e destinate all'incenerimento o al riciclaggio/recupero.

Tutte le parti elettriche devono essere smontate e recuperate come componenti elettrici.

Tutte le parti in plastica devono essere destinate all'incenerimento o al riciclaggio/recupero.

Le parti metalliche devono essere recuperate come rottami di metallo.

Lo smaltimento rifiuti deve essere eseguito nel rispetto delle leggi e normative in materia dei rifiuti vigenti in ciascun Paese

12. RECLAMI E INCIDENTI:

Per segnalare un reclamo inviare una mail a:
regulatory@movigroup.com

Per segnalare un incidente inviare una mail a:
qualityregulatory@pec.movigroup.com

13. CERTIFICATO DI GARANZIA:

La Garanzia copre, in tutta la Comunità Europea, per 24 mesi dalla data di acquisto, i difetti di fabbricazione del prodotto. Tentativi di riparazione, interventi effettuati da parte di personale non autorizzato, danni causati da eventi accidentali, negligenza o uso non conforme a quanto specificato nelle istruzioni d'uso o la mancata manutenzione prevista dalle istruzioni d'uso non sono coperti dalla garanzia.

L'articolo difettoso dovrà essere sempre accompagnato dallo scontrino fiscale o dalla fattura o di altra evidenza analoga comprovante la data di acquisto e da una breve descrizione del difetto riscontrato.

Durante il periodo di Garanzia il suo Rivenditore di fiducia provvederà ad applicare i termini di garanzia come previsto dal vigente Codice del Consumo, modificato dal DECRETO LEGISLATIVO 4 novembre 2021, n. 170 e suoi successivi aggiornamenti.

Riparazioni in Garanzia (24 mesi post- vendita)

Le richieste per intervento su apparecchiature guaste dovranno essere inviate al seguente recapito a mezzo fax o e-mail:

MOVI S.p.A. – Divisione Wimed Servizio Assistenza Tecnica

via Dione Cassio, 15

20138 MILANO

T.: 02 50905411-281F.: 02 50905217e-mail: satwimed@movigroup.com

Le richieste inoltrate dovranno riportare la tipologia, il modello il cod. articolo, lotto e /o numero di serie(ove presente) del dispositivo oggetto di guasto.

Le apparecchiature che necessitano di manutenzione dovranno essere inviate, previo accordo con il servizio tecnico di Movi, al precedente indirizzo e corredate di regolare documento di trasporto e dichiarazione di avvenuta decontaminazione.

Esenzioni di Garanzia

Gli interventi per riparazione resisi necessari a seguito delle seguenti cause non sono coperti da garanzia:

- Uso improprio (esempio: traumi meccanici, utilizzo diverso da quello per cui è stato realizzato il dispositivo acquistato ed fuori dalle indicazioni precisate

sulla scheda tecnica del dispositivo);

- Negligenza o abusi, atti dolosi;
- Catastrofi, eventi naturali (alluvioni, terremoti, fulmini, incendi);
- Riparazioni ed interventi eseguiti da personale non autorizzato dalla sottoscritta Movi S.p.A.;
- Modifiche tecniche non eseguite dal servizio tecnico della sottoscritta Movi S.p.A.;
- Guasti che coinvolgono parti usurabili (es. parti in gomma, cuscini, freni, ...).

Riparazione fuori Garanzia (24 mesi)

La richiesta di riparazione di un dispositivo fuori garanzia deve essere effettuata attraverso gli opportuni canali.

Nel caso la riparazione fosse effettuabile, a seguito della firma del preventivo il dispositivo verrà riparato. I Ricambi hanno una garanzia di un (1) anno dalla data di ricezione.

MOVI S.p.A - Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano
www.movigroup.com

MANUALE D'USO ORIGINALE

Poltrone LADY BERGERE 2.0 - LADY WI 2.0 - LADY UP &
DOWN - LADY COMFORT SLIM - LADY TWIST
Rev.13 10/11/2025



WIMED

TECNOLOGIE MEDICALI

Movi SpA

Via Dione Cassio 15, Milano

www.movigroup.com

infotecnichewimed@movigroup.com